

Misura la larghezza del naso


Taglia	*Advance
Small	* ●
Advance	● ●

Taglia	Élan
Small	●
Regular	●
Large	●

Sleepweaver Advance e Élan


1. Stampa il PDF in dimensioni reali, controllare che la dimensione sia corretta posizionando la tessera sanitaria nel riquadro apposito.
2. Tagliare il misuratore lungo la linea tratteggiata
3. Posizionare il naso sotto al righello per verificare qual è la taglia corretta.

Inserisci qui la tessera sanitaria per controllare di aver stampato il misuratore della misura giusta

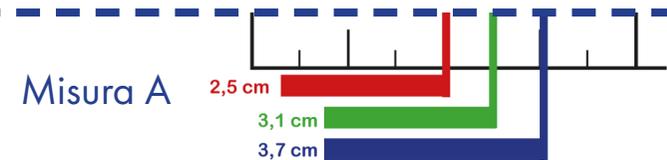

Misura A

Misura B

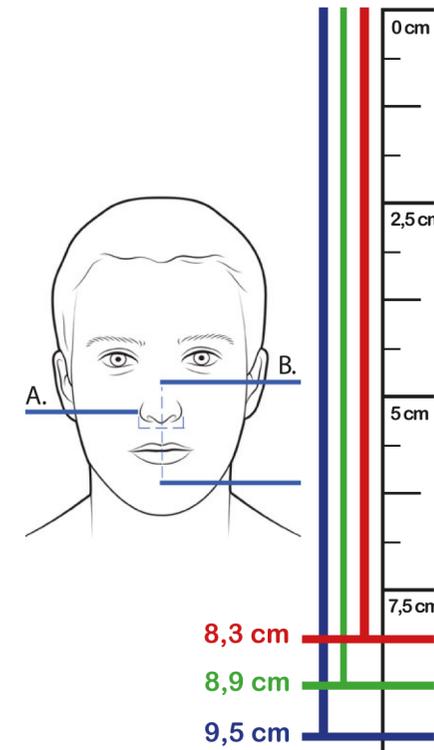

Sleepweaver Anew

1. Stampa il PDF in dimensioni reali, controllare che la dimensione sia corretta posizionando la tessera sanitaria nel riquadro apposito.
2. Tagliare il misuratore lungo la linea tratteggiata
3. Posizionare il naso sotto al righello della Misura A per verificare la prima misura, completare la misurazioni posizionando il righello verticale come mostrato nella figura Misura B per verificare qual è la taglia corretta.

Anew® Taglia	MISURA A	MISURA B
Small	da 2,5 cm a 3,1 cm	da 8,3 cm a 8,9 cm
Regular	da 3,1 cm a 3,6 cm	da 8,9 cm a 9,5 cm
Large	da 3,6 cm in su	da 9,5 cm in su